

Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon.

Instruktion för desinfektion. Version 3

Fastställd av ordförande för funktionsgrupp chefläkare (HS 2020–00257) 2020-05-19

Utarbetad av biträdande regionchefläkare

Syfte

Säkerställa tillgång av stänkskydd för ansikte – visir/skyddsglasögon – genom att beskriva arbetssätt för korrekt desinfektion.

Förändringar sen föregående version

Förtydligande avseende rengöring och desinfektion av visir/skyddsglasögon. I övrigt endast redaktionella förändringar.

Bakgrund

För att säkerställa tillgång på visir/skyddsglasögon, under rådande covid-19 pandemi, har arbetsgivaren bedömt att visir och skyddsglasögon avsedda för engångsbruk kan återanvändas efter desinfektion. Grund för beslutet om återanvändning är att säkerställa att personal har tillgång till adekvat stänkskydd för ansiktet i vårdsituationer där sådan utrustning krävs.

Arbetsbeskrivning vid desinfektion av engångsvisir/engångsskyddsglasögon

- Beskrivningen gäller för såväl flergångs som engångsutrustning.
- Desinfektion
Under hela proceduren gäller aseptiskt arbetssätt, så att utrustningen inte återkontamineras.
 1. Desinfektera händerna med handsprit.
 2. Tag på skyddshandskar.
 3. Desinfektera visirets/skyddsglasögonens hårdplastdelar (ej skumgummidelen på engångsvisir) med ytdesinfektionsmedel med tensid. Desinfektera vid behov även övriga delar på visiret.
 4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.
 5. Tag av skyddshandskar.
 6. Desinfektera händerna med handsprit.
- Engångsvisir/skyddsglasögon kan återanvändas så länge sikten genom det är klar.
- Observera att flergångsvisir inte tål den höga värme som uppnås i diskdesinfektor.

Innehållsansvariga

Ingemar Qvarfordt

Elisabeth Eriksson Gebring